

Mannequin de soins Susie Simon
Réf. 43391



Présentation

1. Introduction

Le mannequin 43391 Susie Simon est un mannequin bisexué qui comprend l'appareil digestif pour les exercices de colostomie, d'iléostomie et stomie supra pubienne.

Particulièrement indiqué pour les formations aux soins infirmiers et pour toutes les formations des professionnels de santé en général devant effectuer des soins aux personnes.

Il permet un ensemble d'exercice, tel que les soins capillaires, les pansements, les soins bucco-dentaires, les soins oculaires, les soins auriculaires, les exercices de bandage, les bains, l'habillage, les injections intramusculaires sur le bras droit ou gauche ou sur la fesse, les soins de stomie, les cathétérismes urinaires masculin et féminin, les lavages et gavage nasogastrique, les lavements, la douche vaginale et frottis vaginaux, les transferts.

2. Contenu de l'emballage

- Un mannequin complet
- Une notice

Montage

Les modèles sont démontables au niveau de la taille pour faciliter le stockage et le transport.

Sur le haut du torse se trouve une poche en plastique reliée par deux tubes au nez et à la bouche du mannequin, c'est le réservoir stomacal, IL DOIT ÊTRE CONNECTÉ AU BAS DU TORSE AVANT TOUT EXERCICE.

Relier le réservoir stomacal au bas du torse, en faisant glisser la bride rouge ouverte du sac stomacal, à la bride rouge située sur la partie la plus élevée du bas du torse.

Dévisser les boutons situés de part et d'autre du bas du torse. Ajuster et faire coïncider les deux parties du torse puis revisser les boutons sur les tiges prévues à cet effet à droite puis à gauche. Éviter de rompre la liaison entre les deux brides rouges durant le montage des deux parties du torse.

Caractéristiques

1. Bandage

Les doigts et les orteils sont séparés pour faciliter les exercices de bandage. La peau est douce et imperméable à l'eau, à l'huile et aux liniments.

2. Soins ophtalmiques

La tête possède 2 yeux amovibles, permettant les exercices ophtalmiques les plus courants, instillation, retrait de corps étrangers, application de pommade dans la région du sac conjonctival, irrigation.

3. Soins dentaires

Les mannequins sont fournis avec des dentiers supérieurs et inférieurs démontables. Pour enlever des dents, insérez doucement un doigt dans la mâchoire supérieure ou inférieure puis taper légèrement. Pour les réinsérer, tenir doucement la lèvre inférieure ou supérieure puis réinsérer les dentiers. Ils sont attachés avec du velcro, leur retrait et leur pose est aisé et ne réclame pas d'effort particulier.

4. Soins d'hygiène

Les mannequins sont imperméables à l'eau et tous les exercices de bains peuvent être pratiqués.

5. Injections

L'emplacement d'injection sur le haut du bras gauche permet la pratique des injections intramusculaires et sous-cutanées. Cet emplacement peut être utilisé sur toute sa circonférence de telle sorte que des injections additionnelles puissent être effectuées. Il y a également un emplacement dans la région fessier supérieur pour permettre les injections intramusculaires dans des fesses. La garniture fessière du secteur d'injection peut être enlevée et remplacée.

6. Les organes génitaux

Masculin, il représente une reproduction d'un organe génital masculin complet avec le scrotum.

Féminin, il représente une reproduction d'un organe génital féminin en vinyle souple.

7. Mouvement

Les articulations solides permettent d'effectuer des mouvements réalistes, la taille est naturellement inclinable à 30°.

8. Oreilles, nez, gorge

L'oreille gauche possède un canal auriculaire avec une capacité de 10 ml, facilitant ainsi les exercices de soins, à la seringue.

Les orifices oraux et nasaux sont connectés au réservoir stomacal, de telle sorte, que l'insertion d'un tube gastrique et les exercices de drainage sont praticables. Un réservoir gastrique avec un orifice de gastrotomie est fourni.

Toujours utiliser un lubrifiant avec l'utilisation de dispositif invasif (Spéculum, Sonde, Tube ...)

9. Colostomie transverse, iléostomie, stomie supra-pubienne

Les orifices de stomie sont des parties importantes de la chirurgie abdominale. Chaque orifice du mannequin est relié à un réservoir interne. Ce dispositif permet l'application des poches de stomie, les exercices de préparation de la peau et les soins d'hygiène autour de l'estomac.

Si les orifices de stomie ne sont pas utilisés, veiller à les fermer avec les bouchons fournis dans le kit.

Les poches peuvent être nettoyées avec une solution savonneuse, un détergent doux en utilisant une grosse seringue, qui permettra au liquide de nettoyage d'être expulsé par l'orifice approprié, cependant pour la poche de cystostomie, le nettoyage se fera par l'expulsion du liquide de nettoyage par l'urètre.

10. Appareil intestinal

Les lavements sont effectués en plaçant le mannequin sur le côté par introduction d'une canule anale de petit diamètre.

NOTE : Une valve anti- retour est installée dans l'anus pour éviter tout reflux pendant l'instillation. Le réservoir à une capacité de 800 ml.

11. Trachéotomie

L'orifice de trachéotomie à la base de la gorge est suffisamment large pour recevoir un tube à trachéotomie de Shiley N°8. Insertions et soins peuvent être pratiqués.

12. Système Urinaire

Le réservoir urétral souple d'une capacité de 1800 ml, possède une valve double diaphragme pour des exercices plus réalistes. Les fluides peuvent être éliminés après insertion d'une sonde urétrale N°18.

13. Cathétérisme chez la femme

Un des fondamentaux des soins est le cathétérisme. Retrait des urines de la vessie par l'introduction d'une sonde. Cette technique doit être effectuée dans des conditions strictes d'asepsie pour prévenir tout risque d'inflammation et d'infection du système urinaire.

La technique est applicable mannequin sur le dos. En pratiquant le cathétérisme, séparer le minora labia pour dégager l'ouverture de l'urètre. L'aspect réaliste de la vulve permet l'apprentissage dans l'asepsie et la désinfection. Il conviendra d'utiliser une sonde urétrale N°18. Utiliser un récipient pour recevoir les urines de la vessie, la gravité permet au liquide de mieux s'écouler simulant la procédure avec encore plus de réalisme.

14. Cathétérisme chez l'homme

Tout aussi fondamental que pour la femme, le mannequin pourra être utilisé pour le cathétérisme urinaire avec une sonde urinaire N°18. La verge flexible est reliée par l'urètre à la vessie, il conviendra de maintenir le pénis dans la bonne position pour y insérer le cathéter. Les soins d'asepsie et de désinfection pourront être pratiqués. Utiliser un récipient pour recevoir les urines de la vessie, la gravité permet au liquide de mieux s'écouler simulant la procédure avec encore plus de réalisme.

Toujours utiliser un lubrifiant avec l'utilisation de dispositif invasif (Spéculum, Sonde, Tube ...)

En supination, il se peut que le liquide puisse ne pas être évacué, il conviendra alors d'injecter de l'air dans la sonde, la vessie fonctionnera alors normalement.

Entretien, garantie et dépannage

1. Entretien

Désengager chaque réservoir en les saisissant fermement, les séparer des brides rouges qui les relient au torse, puis les purger.

Ils peuvent être nettoyés avec une solution savonneuse ou un détergent doux avec l'aide d'une seringue. Le remplissage de la vessie entre 500 et 1800 ml peut s'effectuer par l'orifice supra-pubien à l'aide d'une seringue ou d'un entonnoir.

Toujours utiliser un lubrifiant avec l'utilisation de dispositif invasif (Spéculum, Sonde, Tube ...)

La peau des mannequins peut être nettoyée avec un détergent doux, du savon ou de l'eau. Ne jamais utiliser de marqueurs ou de stylo, ils laisseraient des marques indélébiles. Ne pas utiliser de papier journal ou encore d'iode. Un mauvais stockage peut endommager le mannequin. Garder le carton d'emballage pour stocker le mannequin lorsqu'il n'est pas utilisé.

2. Garantie

Les matériels livrés par PIERRON sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation incorrecte du matériel.

NOTICE

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure, matériel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pourrions admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. A l'export, ce délai est porté à un mois.

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura été constatée.

Notes